



INSTRUCCIONES PARA LA TOMA Y ENVÍO DE MUESTRAS DE BOVINOS

El Laboratorio de Genética Animal de octamer provee gratuitamente sobres impresos para la toma de muestras y la correcta identificación de los animales. Solicítelos a muestras@geneticaanimal.com.ar También se encuentra disponible un modelo de sobre para imprimir y armar en www.geneticaanimal.com.ar



PELO

- ① Identifique al animal y complete el sobre a utilizar.
- ② Limpie la cola del mismo para eliminar materia orgánica adherida y pelos sueltos.
- ③ Separe un mechón de 30-40 pelos secos de la borla de la cola.
- ④ Enrolle el mechón en su dedo índice y tire. *No cortar con tijera.*
- ⑤ Verifique la presencia de folículos en la raíz (bulbos pilosos).
- ⑥ Colóquelo en el sobre de papel. *Guardar en lugar seco, a temperatura ambiente.*
- ⑦ Asegúrese de mantener sus manos libres de pelos antes de tomar una nueva muestra.



SEMEN

- ① Coloque una pastilla de semen o pajueta en un sobre correctamente identificado. *Ubicar previamente la pastilla en un tubo limpio.*
- ② Envíe a temperatura ambiente.



SANGRE

- ① Coloque la muestra en un tubo con anticoagulante.
- ② Envíe en un recipiente refrigerado.